

# TENA Slip

TENA Slip is een ééndelig systeem, dat gewoon zonder ondergoed gedragen kan worden. Het beschermt overdag en 's nachts optimaal. TENA Slip is gemaakt voor mannen en vrouwen. Het is verkrijgbaar in 4 absorptieniveaus: TENA Slip Plus, TENA Slip Super, TENA Slip Maxi en TENA Slip Ultima. Er zijn drie maten: Small\*, Medium en Large.


Security Barrier™: deze opstaande vochtafstotende randjes verminderen de kans op doorlekken

Tape Landing Zone™: maakt het herhaaldelijk openen en sluiten van de tapes mogelijk

Ademende achterzijde: zacht en 100% ademend materiaal voor discretie en verhoogd comfort

Druppelindicatie voor gemakkelijke productkeuze

Easy-Select™ kleurcodering: voor het makkelijk herkennen van het juiste absorptieniveau

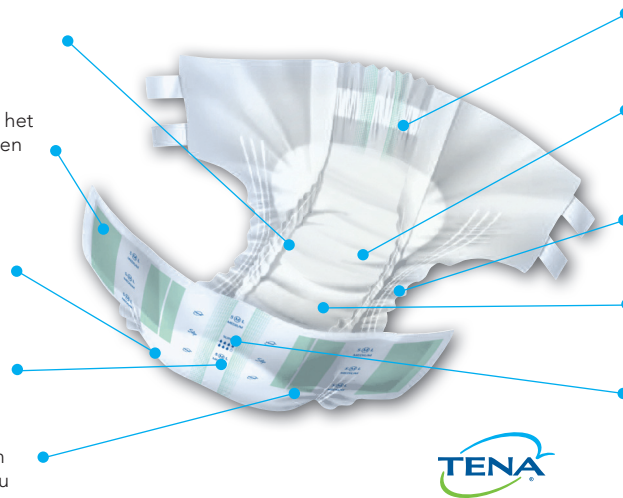

Flexifit™ taille-elastiek voor een perfecte pasvorm

Twin Core Dry Soft Technology™ dubbele pulpmat: bovenste laag verspreidt de urine, onderste laag neemt urine snel op

Anatomisch gevormde been-elastieken: laten het verband nauw aansluiten op het lichaam

FeelDry™: snellere en betere opname voor minder huidirritatie

True Blue™ urine-indicator: de gele kleur verandert in opvallend blauw, wanneer het tijd is om te verschonen

## Voor wie en wanneer is TENA Slip geschikt?


- Voor mannen en vrouwen met een gedeformeerde bouw
- Voor urinespaarders
- Voor plukkers/prutsers
- Bij fecesincontinentie\*\*: veel en dunne feces
- Bij aandrang-, meng-, druppelincontinentie en neurologische incontinentie\*\*
- Geschikt voor zeer lange draagduur, ook gedurende de nacht (TENA Slip Maxi of in uitzonderlijke situaties TENA Slip Ultima)
- TENA Slip Extra Small is speciaal voor kinderen met urine- en/of fecesincontinentie
- TENA Slip Ultima voor superieure absorptie en ultiem comfort door zacht ademend materiaal.

Volgens TENA is dit de meest optimale keuze. De uiteindelijke keuze wordt bepaald door het belang dat wordt gehecht aan de factoren: de drager, het verzorgend personeel, de prijs en het milieu.

\* Uitgezonderd TENA Slip Ultima.

\*\* Meer informatie over de verschillende vormen van incontinentie vindt u achter het tabblad 'Incontinentie'.

# De TENA *Slip* verbanden op een rij

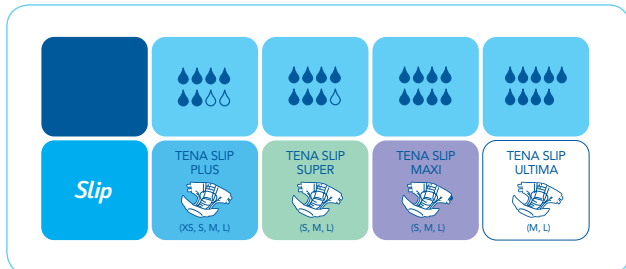

## De beste manier om TENA *Slip* aan te leggen

1. Kies de kleur afhankelijk van het benodigde absorptieniveau: Plus (blauw), Super (groen), Maxi (paars) of Ultima (wit met blauwe bolletjes). De kleur wordt aangegeven door middel van een brede band verticaal over het product. Het absorptieniveau wordt ook aangegeven door middel van druppels.
2. De maatkeuze is afhankelijk van de omvang van de persoon:  
Extra Small (49 - 74 cm), Small (56 - 85 cm), Medium (73 - 122 cm) en Large (92 - 144 cm).
3. Vouw het verband open aan de achterzijde en vouw het onmiddellijk in gootvorm. Laat hierbij de voorzijde gesloten, voor eenvoudige plaatsing.
4. Plaats het verband tegen de stuit, met als richtpunten:
  - Urine-indicator op bilnaad
  - Flexifit™ elastiek in de lende
5. Voorzijde zigzaggend optrekken in gootvorm tussen de liesplooien.



5a

Gebruiks-  
aanwijzing  
staand



5b

Gebruiks-  
aanwijzing  
liggend

6. Elastieken goed in de liesplooien plaatsen alvorens het verband vast te plakken. Zorg voor een niet al te hoge spanning op de elastieken in de liesplooien voordat u het verband vast plakt.



6a


Gebruiks-  
aanwijzing  
staand



6b

Gebruiks-  
aanwijzing  
liggend

7. Eerst de onderste hersluitbare plakstrips recht op de 'Tape Landing Zone™' van het verband plakken; daarna de bovenste hersluitbare plakstrips schuin naar beneden plakken. Hierdoor sluit de Flexifit™ aan de achterzijde van het verband goed aan op het lichaam, wat de kans op lekkage vermindert.

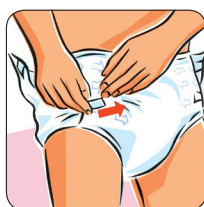

7a

Gebruiks-  
aanwijzing  
staand



7b

Gebruiks-  
aanwijzing  
liggend

**Opmerking:** als de plakstrips verder dan de tweede balk op de 'Tape Landing Zone™' geplakt kunnen worden, dan is het verband te groot en moet een kleinere maat worden gekozen. Een te groot verband verhoogt de kans op lekkage!

